

Podstawowe informacje

o odtwarzaczu dla niewidomych „Czytak Plus”

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać włącznik/wyłącznik około 1 sekundę. Włączenie jest sygnalizowane jednym krótkim sygnałem dźwiękowym a wyłączenie podwójnym sygnałem. Klawisz REC włącza nagrywanie notatki głosowej jednocześnie zapalając czerwoną diodę a ponowne jego naciśnięcie spowoduje zatrzymanie nagrywania i zgaśnięcie diody.

Działanie klawiszy:

Klawisz 1	Zmiana trybu pracy (moduły „Czytak”, „teksty”, „audio”, „daisy”, „dyktafon”, „radio”), po wciśnięciu tego klawisza Czytak mówi, w jakim jest trybie
Klawisz 2	włączanie i wyłączanie odtwarzania książek oraz notatek
Klawisz 4	przechodzenie do poprzedniego odcinka książki lub poprzedniej notatki
Klawisz 6	przechodzenie do następnego odcinka książki lub następnej notatki
Klawisz 7	zmiana książki na poprzednią, wybór pamięci wewnętrznej w dyktafonie
Klawisz 9	zmiana książki na następną, wybór karty pamięci w dyktafonie
Klawisz 5	głośniej
Klawisz 8	ciszej
Klawisz 0	informacje o słuchanej książce
Klawisz *0	„Odtwarzanie ciągle” lub „Zatrzymaj pomiędzy odcinkami”

Nagrywanie książek w formacie Czytaka na kartę pamięci urządzenia Czytak Plus:

1. Jeśli Czytak jest wyłączony, to po podłączeniu do komputera automatycznie się włączy.
2. Po podłączeniu Czytaka do komputera przez kabel USB należy wcisnąć *13 (klawisz „gwiazdka”, a następnie klawisze 1 i 3). Usłyszymy komunikat: „Czy udostępnić kartę? 1) Tak, 2) Nie”
3. Wciskamy klawisz 1, by karta pamięci Czytaka pojawiła się na komputerze, jako dysk wymienny.
4. Możemy wówczas nagrać nowe książki. Najlepiej jest najpierw usunąć wszystko, co jest na karcie pamięci. Trzeba to zaznaczyć (klawisze „Control” + „a”) i usunąć klawiszem „Delete” („Del”).
5. W nowym oknie otwieramy zawartość płyty DVD lub wyszukujemy miejsce przechowywania plików z książkami.
6. Wchodzimy do katalogu wybranej książki i zaznaczamy 3 pliki z numerkami.
7. Kopiujemy pliki za pomocą myszki lub klawiatury („Control” + „c”)
8. Przechodzimy do karty pamięci i wklejamy pliki za pomocą myszki lub klawiatury („control” + „v”).
9. Każda książka składa się z 3 plików. Jeśli skopiujemy 3 książki, na karcie pamięci Czytaka powinno znajdować się 9 plików.
10. Na końcu najlepiej bezpiecznie usunąć kartę za pomocą „kłódki” na dolnym pasku komputera.
11. Należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie Czytak Plus. Wówczas po przejściu klawiszem 1 do modułu „Czytak” będziemy mogli klawiszami 7 i 9 przejrzeć dostępne książki.

Nagrywanie książek w formacie mp3 (z zasobów bibliotek) na kartę pamięci urządzenia Czytak Plus:

1. Jeśli Czytak jest wyłączony, to po podłączeniu do komputera automatycznie się włączy.
2. Po podłączeniu Czytaka do komputera przez kabel USB należy wcisnąć *13 (klawisz „gwiazdka”, a następnie klawisze 1 i 3). Usłyszymy komunikat: „Czy udostępnić kartę? 1) Tak, 2) Nie”
3. Wciskamy klawisz 1, by karta pamięci Czytaka pojawiła się na komputerze, jako dysk wymienny.
4. Możemy wówczas nagrać nowe książki. Najlepiej jest najpierw usunąć wszystko, co jest na karcie pamięci. Trzeba to zaznaczyć (klawisze „Control” + „a”) i usunąć klawiszem „Delete” („Del”).
5. W nowym oknie otwieramy zawartość płyty z audiobookiem.
6. Zaznaczamy wszystkie pliki na płycie myszką lub za pomocą skrótu „Control” + „a”.
7. Kopiujemy pliki za pomocą myszki lub klawiatury („Control” + „c”)
8. Przechodzimy do karty pamięci. Tworzymy folder „audio” lub wchodzimy do istniejącego folderu pod tą nazwą.
9. Tworzymy folder o nazwie książki. Najlepiej jest nie używać polskich znaków, a odstępy pomiędzy wyrazami zamienić na znaki (-) lub (_). Przykład: dla książki pod tytułem „Śmierć w Tokio” tworzymy folder pod nazwą „smiercwtokio” lub „smierc-w-tokio”.
10. Wklejamy pliki do utworzonego folderu za pomocą myszki lub klawiatury („control” + „v”).
11. Na końcu najlepiej bezpiecznie usunąć kartę za pomocą „kłódki” na dolnym pasku komputera.
12. Należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie Czytak Plus. Wówczas po przejściu klawiszem 1 do modułu „Audio” będziemy mogli klawiszami 7 i 9 przejrzeć dostępne książki.